Atelier anneaux de contraception thermique par Otoko

Prise de note du 26 sept 2023, à compléter par des photos et déveloper

https://samflam.notion.site/samflam/Tutoriel-Silicone-3bac4b5a6a254ba9bab7c9ec88f7ef35

présentation de la méthode de contraception thermique essayages moulage séchage

balance
silicone
huile de silicone
nacres colorées
paillettes
pompe à vide
batonnets de glace pour mélanger
contenants plastiques
gants nitrile
des seringues
un coupe-fil

le silicone est composé de 2 composantes (A et B)

nettoyer et préparer les moules

préparation d'un mélange

- verser 100gr de composante A
- verser 14gr d'huile de silicone (plus on en met, plus le résultat sera souple)
- verser une pointe de couteau de nacre colorée
- ajouter des paillettes :)
- mélanger en touillant
- ajouter 100gr de composante B (TODO vérifier)
- passer à la pompe à vide pour éliminer les bulles
- remplir les seringues du mélange jusqu'à vider le pot, on remplit les seringues par le haut (PAS en aspirant, le mélange est trop visqueux)
- injecter dans les moules jusqu'à ce que ça déborde, laisser reposer et réinjecter si nécessaire
- laisser sécher
- démouler
- couper les "barbures" au coupe-fil

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse: http://www.lesporteslogiques.net/wiki/atelier/anneaux_de_contraception_thermique

Article mis à jour: 2023/09/29 22:08